

保守点検・修理 報告書

管理 No.

40

発行日 平成25年7月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100059
作業年月日	平成25年7月24日		作業時間: 1 Hr
顧客名	平井医院		TEL: 019-672-3200
所在地	岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森138-2		担当 様
販売店	(株)三協医科器械 本社		担当 太田 様
納入年月日	平成 23年 6月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 623
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver. 0107

装置情報	交換後運転回数: 307	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 64	殺菌+7L: 243
	リークチェック: ☒	自己洗浄: 184	アルコール単独: ☒	エア単独: ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
排水栓		☒	1	濃度計フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	
コネクタ継手チューブ側		☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 7 月 24 日

ご署名 平井博夫

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

