

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140319-G

発行日 平成26年 3月19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒器 OED-1000S		製造番号 : 300022
作業年月日	平成 26年 3月 19日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	藤谷内科クリニック様		TEL : 022-361-0211
所在地	塩釜市南錦町8-10		担当 様
販売店	株式会社シバタインテック		担当 様
納入年月日	平成 25年 4月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

臭気なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 6/3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

※別添排水パイプ交換

装置情報	交換後運転回数 : 703	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌 : 190	殺菌+7L : 516
	リークチェック : 32	自己洗浄 : 249	アルコール単独 : 5	エア単独 : 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☒	
吸盤 (3個)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 3 月 19 日

ご署名 久野 幸子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	1726.3.19 