

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140318 H
発行日 平成26年3月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100666
作業年月日	平成26年3月18日		作業時間:	1 Hr
顧客名	桂島医院		TEL:	0191-21-8883
所在地	岩手県一関市駅前22		担当	様
販売店	(株)南部医理科		担当	瀬川 様
納入年月日	平成25年3月12日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 1回	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
fzv

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 582
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
Ver 0107

装置情報	交換後運転回数:	117	更新(リセット)	実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	2	殺菌+7L:	116
	リークチェック:	1	自己洗浄:	110	7L単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 3月 18日

ご署名 桂島 加奈子 

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H26. 3/18 