

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-16683

No. 140411

納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	OED-1000
顧客名	菊地胃腸科内科医院 様		機番	100492
所在地	宮城県仙台市青葉区春日町 10-30		納入日	平成 24 年 5 月 29 日
点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 2 月 20 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26 年 4 月 8 日

修理依頼・不具合内容

2013 年 9/26、10/18 停電（E:403）
 2014 年 2/17 09:28 停電（E:403）・・・新鋭工業殿 コントロール基板交換
 2/18 13:05 停電（E:403）・・・「停電」異常が再発した

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

①停電（E:403）につきまして

機械が運転中に電気が供給されない場合に発生します。具体例として電源コンセントが抜けかかっている、電気の供給が極短時間途切れた（瞬時電圧低下）等があります。

②運転確認結果

運転条件および電源条件を振って運転確認しましたが異常は再現しませんでした。

③内部点検結果

機械内部の配線に損傷や接触不良も見られず、特に問題はありませんでした。

原因が特定できず誠に恐縮ですが
 電源系統の部品を一式交換いたしましたので
 様子を見てくださいますよう お願いいたします。



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品 交換（下表と写真をご参照ください）
- 2：絶縁抵抗測定：2000 MΩ以上・・・正常
- 3：電圧変動試験：82.4～105V・・・正常
- 4：オゾン水濃度測定：0.73ppm・・・正常

〔3〕装置情報

交換後運転回数：427 殺菌：795、消毒+アルコール：279、リークチェック：1038
 自己洗浄：420、アルコール単独：377、I7P°-ジ 単独：10

承認



審査



作成

H26. 4. 11

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	電源コード	1 本	
	ノイズフィルタ（100V 電源側 1、2）	1 式	
	24V 電源	1 台	タッチパネル側アース線含む
	メインスイッチ	1 個	
	濃度計用フィルタ（脱気フィルタ）	1 枚	写真なし

（株）IHI シンバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528