

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150516-G
発行日 平成26年 5月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100492
作業年月日	平成26年 5月16日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	菊地胃腸科内科医院 様		TEL: 022-261-3344
所在地	仙台市青葉区春日町10-30		担当 様
販売店	有限会社阿部器械店 様		担当 様
納入年月日	平成24年 5月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 436
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 470	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 825	殺菌+7L: 292
	リークチェック: 1078	自己洗浄: 438	7L単独: 398	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手 本体側		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年 5月 17日

ご署名 菊地胃腸科内科 菊地 徹

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H26.5.16 

100492号 殺菌履歴データ

日付	時刻	オゾン 濃度	作業 者No.	スコープ No.	mode	備考
2014/4/7	19:39	0.73	0	0	0	岡山工場での運転
2014/4/7	19:56	0.73	0	0	0	
2014/4/7	20:22	0.72	0	0	0	
2014/4/7	20:39	0.73	0	0	1	
2014/4/7	20:52	0.73	0	0	0	
2014/4/8	8:30	0.73	0	0	0	
2014/4/8	8:48	0.73	0	0	0	
2014/4/8	9:02	0.73	0	0	0	
2014/4/8	9:15	0.73	0	0	0	
2014/4/8	9:29	0.73	0	0	0	
2014/4/18	13:50	0.74	0	0	1	修理機返却時の試運転
2014/4/19	9:36	0.71	0	0	0	↓客先にて使用開始
2014/4/19	10:59	0.72	0	0	1	
2014/4/19	11:22	0.72	0	0	1	
2014/4/19	11:53	0.72	0	0	0	
2014/4/19	12:39	0.74	0	0	1	
2014/4/21	11:06	0.72	0	0	0	
2014/4/21	11:50	0.73	0	0	1	
2014/4/22	10:10	0.72	0	0	0	
2014/4/23	9:40	0.72	0	0	0	
2014/4/23	12:08	0.73	0	0	1	
2014/4/23	12:30	0.72	0	0	1	
2014/4/24	9:56	0.72	0	0	0	
2014/4/24	10:35	0.73	0	0	0	
2014/4/24	10:57	0.74	0	0	0	
2014/4/25	9:31	0.71	0	0	0	
2014/4/26	9:18	0.72	0	0	0	
2014/4/28	10:39	0.71	0	0	0	
2014/4/28	11:47	0.73	0	0	1	
2014/5/1	9:42	0.72	0	0	0	
2014/5/1	10:51	0.71	0	0	0	
2014/5/1	11:38	0.73	0	0	0	
2014/5/2	10:20	0.71	0	0	0	
2014/5/8	12:18	0.72	0	0	1	
2014/5/9	9:49	0.71	0	0	0	
2014/5/10	9:10					
2014/5/10	9:25	0.71	0	0	0	
2014/5/10	9:45	0.74	0	0	0	
2014/5/10	10:07	0.74	0	0	0	
2014/5/10	10:46	0.73	0	0	0	
2014/5/10	11:17	0.72	0	0	1	
2014/5/10	12:02	0.71	0	0	0	
2014/5/12	9:13					
2014/5/12	10:10	0.74	0	0	1	
2014/5/12	11:47	0.72	0	0	0	
2014/5/13	9:21	0.72	0	0	0	
2014/5/13	9:40	0.73	0	0	0	
2014/5/13	9:59	0.74	0	0	0	
2014/5/13	10:41	0.73	0	0	0	
2014/5/13	10:59	0.75	0	0	0	
2014/5/13	15:43	0.72	0	0	1	
2014/5/13	16:58	0.71	0	0	1	
2014/5/15	10:51	0.71	0	0	0	
2014/5/15	11:23	0.72	0	0	0	

菊地胃腸科内科医院様 工事写真

写真1:異常履歴画面

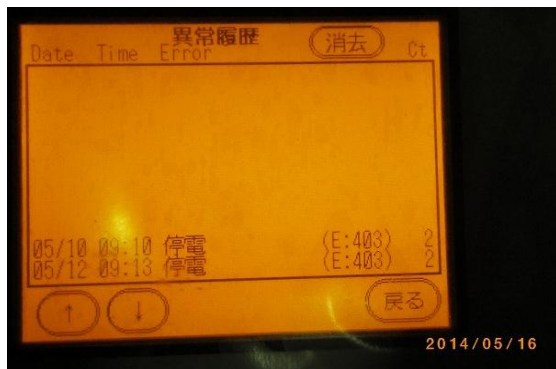


写真2:OEDが使用している壁コンセント
※アースなし 2P壁コンセント



写真3:運転中の電圧、電流測定



写真4:分電盤 主幹:30Aのブレーカ



写真5:移設予定の壁コンセント
※アース付 2P壁コンセント

