

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20(40529-11

発行日 平成 26 年 5 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100298
作業年月日	平成 26 年 5 月 29 日	作業時間:	1 Hr
顧客名	五所の診療所	TEL:	0172-84-2311
所在地	弘前市大字五所字野沢 39-13	担当	様
販売店	(株) Xディセオ	担当	金子 様
納入年月日	平成 24 年 1 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 2回目 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

fcl

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 555
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 84	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 213
	リークチェック: 126	自己洗浄: 190	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 70

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 5 月 29 日

ご署名 中村 恵彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H26.5/29

