

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140625-0

発行日 平成26年6月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100043
作業年月日	平成 26年 6月 25日		作業時間 : / Hr
顧客名	明日実病院 様		TEL : 0186-42-2305
所在地	秋田県大館市御成町 3-2-3		担当 様
販売店	株式会社いわしや		担当 工藤 様
納入年月日	平成 22年 6月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 642
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数 : /	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌 : 2915	殺菌+アル : 185x
	リークチェック : 212x	自己洗浄 : 546	アルコール単独 : 37	エア単独 : /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	給水フィルター		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 6 月 25 日

ご署名

福士 批



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス
TEL : 022-782-4661

責任技術者

作業者



H26.6.25

