

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140725-H

発行日 平成26年7月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100059
作業年月日	平成26年7月25日	作業時間	1 Hr
顧客名	平井医院	TEL	019-672-3200
所在地	岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森138-2	担当	様
販売店	(株)三協医科器械	担当	太郎 様
納入年月日	平成23年6月20日	保証期間	内口 外口
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H25.7/23, E202, H26 7/2 E202 x 2

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 445
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 269 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 174	殺菌+7L: 659
	リークチェック: 0 自己洗浄: 534	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年7月25日

ご署名 平井 博夫 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H26-7/25 