

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140812-G
発行日 平成26年 8月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100748
作業年月日	平成26年 8月12日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	大泉記念病院 様		TEL: 0224-22-2111
所在地	白石市福岡深谷一本松5-2		担当 総務室橋 様
販売店	株式会社シバタインテック 様		担当 長谷 様
納入年月日	平成25年 8月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 1年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常あり

不具合原因、作業内容

※ハイパーO₂導入電磁弁交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 723
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常あり

装置 情報	交換後運転回数: 995	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 434	殺菌+アル: 562
	リークチェック: 0	自己洗浄: 235	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	コネクタ継手 本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	/	コネクタ継手 チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	/	アルコールタンクキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 8 月 12 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F TEL: 022-782-4661	責任技術者	作業者
	大友	後藤