

保守点検・修理 報告書

管理 No. No.201401008-1-0

発行日 平成26年10月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100521
作業年月日	平成 26年 10月8日		作業時間: / Hr
顧客名	こんの内科クリニック 様		TEL: 024-573-1860
所在地	福島県福島市曾根田3-19		担当 様
販売店	サンセイ医機株式会社		担当 鈴木 様
納入年月日	平成 24年 10月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
なし	
不具合原因、作業内容	
なし	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 642
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
なし	

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 32	殺菌+7L: 326
	リークチェック: 215	自己洗浄: 167	アルコール単独: 11	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	医療法人こんの内科クリニック
ご署名	理事長 今野 正巳

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	H26.10.8 大友