

保守点検・修理 報告書

管理 No. 201401002-1-0

発行日 平成26年10月2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300068
作業年月日	平成 26年 10月2日		作業時間: / Hr
顧客名	夕日ヶ丘クリニック 様		TEL: 0184-74-3686
所在地	福島県いわき市泉町1-3-13		担当 様
販売店	株式会社メディセオ秋田支店		担当 杉山 様
納入年月日	平成 25年 9月17日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 768
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
なし			

装置 情報	交換後運転回数: /	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 10	殺菌+7L: 0
	リークチェック: /	自己洗浄: 8	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄		〒018-0311
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		秋田県に海ほたる市金沢町十二林106番地1
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		夕日ヶ丘クリニック
ご署名		院長 佐々木 健二
TEL 0184-74-3686 FAX 0184-74-3644		

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H26.10.2 