

保守点検・修理 報告書

管理 No. 201401021-2-0

発行日 平成26年10月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100540
作業年月日	平成 26年 10月21日		作業時間: / Hr
顧客名	矢内クリニック 様		TEL: 024-942-0871
所在地	福島県郡山市緑ヶ丘東3-1-4		担当 様
販売店	安積医科器械株式会社		担当 増子 様
納入年月日	平成 24年 10月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 674
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置情報	交換後運転回数: 1	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1016	殺菌+アル: 3
	リークチェック: 2	自己洗浄: 570	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 10月 21日

ご署名 三好

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

H26.10.21