

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141205-S

発行日 平成26年12月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100606
作業年月日	平成26年12月5日		作業時間: / Hr
顧客名	寺崎内科胃腸科医院 様		TEL: 0191-23-6211
所在地	岩手県一関市青葉1-6-10		担当
販売店	(株)南部医理科		担当 瀬川様
納入年月日	平成 24年 11月 21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常ナシ			
不具合原因、作業内容			
定期点検にツ交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 970
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 999	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1.858	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 480	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		寺崎内科胃腸科 医師 寺崎公二
		寺崎印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	庄子