

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100289
作業年月日	平成 26年 12月 9日	作業時間	1.0 Hr	
顧客名	今金診療所		TEL	0137-82-4187
所在地	北海道札幌市東区北6条東5-1-4		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 23年 12月 2日	保証期間	内 年 外	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

良好。状態良好、水槽内に汚水もありません、水の臭い、給水ラインの点検、
0137-82-4187の点検をお願いします。

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 258	殺菌+7L: 301			
	リークチェック:	自己洗浄:	7L-7L単独:	エア単独:			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		洗浄剤-7Lネジ 2		☒	
排水栓		☒		" " 水漏れ×2		☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用7Lネジ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

北海道札幌市東区北6条東5-1-4
 今金診療所
 医療法人野の花
 年 月 日

三職名 長 富田 泰 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北6条東5-1-4
 TEL: 011-741-7752

責任技術者 作業者

