

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141218-1

発行日 平成26年12月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100133	
作業年月日	平成 26年 12月 18日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	織内医院 様		TEL	0246-44-1133	
所在地	福島県いわき市常磐関船町迎16		担当	様	
販売店	株式会社日東		担当	様	
納入年月日	平成 22年 12月24日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
12/29 酸素圧力異常 2	
不具合原因、作業内容	
ボンベが開いていない。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 544
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
なし	

装置 情報	交換後運転回数	1388	更新（リセット）	実施・未実施	殺菌	3072	殺菌+アル	1264
	リークチェック	509	自己洗浄	1008	アルコール単独	16	エア単独	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2セット
排水栓		☒	1	活性炭フィルター		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

大崎 浩美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	26.12.18 