

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150109-01

発行日 平成26年1月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100441
作業年月日	平成 27年 1月9日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	会津西病院 様		TEL: 0242-56-2525
所在地	福島県会津若松市北会津町東小松2335		担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		担当 高原 様
納入年月日	平成 24年 3月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 653
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 619	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 2626	殺菌+アル: 669
	リークチェック: 3332	自己洗浄: 298	アルコール単独: 0	エア単独: 36

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
吸盤(3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 1 月 9 日

ご署名

大須賀 伸夫

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27.1.9 