

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100605
作業年月日	平成26年12月24日	作業時間: Hr 1.5
顧客名	鈴木クリニック 様	TEL: 023-681-8011
所在地	山形県山形市桜町4-6-16	担当
販売店	岡崎医療株式会社	担当 栗田様
納入年月日	平成 24年 11月 27日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 578
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし
① 背面パネルネジ10箇所にて、2P、7タッパで改善。
② オゾンセンサー取付板をボルト10箇所にて交換。

装置情報	交換後運転回数: 8809 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 2.3	殺菌+7L: 1207
	リークチェック: 1537 自己洗浄: 439	アルコール単独: 0	エア単独: 9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	2
排水栓		☒	/	コネクタ継手 本体		☒	2
濃度計用フィルター		☒	/	コネクタ継手 4-7mm		☒	2
オゾン濃度計 Assy		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成26年12月24日

ご署名 鈴木 康之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H26.12.24

