

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150114-15

発行日 平成27年1月14日

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 販売名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S | | 製造番号 : 300145 |
| 作業年月日 | 平成 27 年 1 月 14 日 | | 作業時間 : 1 Hr |
| 顧客名 | 康安外科内科医院 様 | | TEL : 0172-33-6262 |
| 所在地 | 青森県弘前市大字栄町1-2-6 | | 担当 |
| 販売店 | コセキ(株) | | 担当 鹿内様 |
| 納入年月日 | 平成 26年 1月 16日 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品 |
| 作業区分 | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> | | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常履歴ナシ

不具合原因、作業内容

| 点検項目 | | | |
|----------|---|-----------|--|
| フタロック | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 439 |
| オゾンセンサ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.75 ppm |
| 水漏れ確認 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレイ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 ① 病院提出用には蓋書がなかった。
 排水フィルター(有) 運転回数が少ないため、今日は交換はした。病院には、予備があるのび、取付完了。

| | | | | |
|------|--------------|--|-------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数 : 13 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌 : 5 | 殺菌+アル : 10 |
| | リークチェック : 0 | 自己洗浄 : 13 | アルコール単独 : 1 | エア単独 : 0 |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | コネクタ継手 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
| 排水栓 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 吸盤 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| 濃度計用フィルター | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| オゾン濃度計 Assy | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| オゾンセンサー | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

弘前市大字栄町1丁目2の6
 康安外科内科医院
 院長 鳴海 康方
 ご署名 TEL 33-6262

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
 TEL : 022-782-4661

| | |
|---|---|
| 責任技術者 | 作業者 |
|  |  |