

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150114-0

発行日 平成27年1月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100583
作業年月日	平成 26年 1月15日		作業時間: / Hr
顧客名	城北内科胃腸科クリニック 様		TEL: 0246-22-8800
所在地	福島県いわき市平幕ノ内字高田18-8		担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売(株) いわき営業所		担当 様
納入年月日	平成 24年 12月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ない			
不具合原因、作業内容			
ない			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 512
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	トレイ 672	正常 ☒
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
70754 0107に交換			

装置情報	交換後運転回数: 662	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 270	殺菌+アル: 1078
	リークチェック: 1348	自己洗浄: 598	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
吸盤(3個入)		☒	3	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	27年 1 月 15 日 城北内科胃腸科クリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
 TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	H27.1.15 大友