

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150313-G1

発行日 平成27年 3月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100388 100338
作業年月日	平成 27年 3月 13日		作業時間: 2 Hr
顧客名	まだらめ内科医院様		TEL: 0225-24-9133
所在地	石巻市わかば二丁目1番地5		担当 様
販売店	株式会社バイタルネット		担当 渋谷 様
納入年月日	平成 24年 2月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 3年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし 交換パネル 3つあり

不具合原因、作業内容

交換パネル 交換 (交換)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換パネル 交換 改善 他問題なし

装置情報	交換後運転回数: 142 更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 7	殺菌+7L: 4.8
	リークチェック: 400	自己洗浄: 37.5	7L単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	交換パネル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田口 仁 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	後藤