

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150526-01

発行日 平成27年5月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300244
作業年月日	平成 27年 5月26日		作業時間 : / Hr
顧客名	安濃胃腸科内科医院 様		TEL : 0246-23-6000
所在地			担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス (株)		担当 小関 様
納入年月日	平成 26年 5月27日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目		定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
9/22 酸素圧力異常 2			
不具合原因、作業内容			
たかし			
点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 660
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
70734 0207 に変更			

装置情報	交換後運転回数 :	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌 :	3	殺菌+アル :	577	
	リークチェック :	549	自己洗浄 :	267	アルコール単独 :	0	エア単独 :

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手(本体側)		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手(コネクタ側)		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1
濃度計フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1	アルコールキャップ		<input checked="" type="checkbox"/>	1
吸盤(3個入)		<input checked="" type="checkbox"/>	3			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄			
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。			
ご署名			年 月 日
石渡 国太郎			印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
 TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27.5.26 