

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150414-G

発行日 平成 27年 4月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100157
作業年月日	平成 27年 4月 14日		作業時間: Hr
顧客名	さいわい町ファミリークリニック 様		TEL: 022-781-9815
所在地	仙台市宮城野区幸町2-21-8		担当 赤羽院長 様
販売店	丸木医科器械株式会社		担当 小平 様
納入年月日	平成 23年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 4年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 5/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 127	更新 (リセット) ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌: 9	殺菌+アル: 474
	リークチェック: 17	自己洗浄: 470	アルコール単独: 0	エア単独: 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 4 月 14 日

ご署名

I 藤

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

