

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150311-01

発行日 平成27年3月11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号: 300216
作業年月日	平成 27年 3月11日		作業時間: / Hr
顧客名	ふるどのクリニック 様		TEL: 0247-32-1114
所在地			担当 様
販売店	株式会社ジオット 様		担当 様
納入年月日	平成 26年 3月14日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 637
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

707740205 → 020712 変更

装置情報	交換後運転回数: 424	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 96	殺菌+7L: 329
	リークチェック: ☒	自己洗浄: 234	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☐	
吸盤(3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 3 月 11 日

ご署名 佐々木厚博

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27.3.11 