

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150521-G

発行日 平成27年 5月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100498
作業年月日	平成27年 5月21日		作業時間: / Hr
顧客名	玉瀧医院		TEL: 0224-56-1012
所在地	宮城県柴田郡柴田町槻木上町1-1-58		担当 様
販売店	株式会社バイタルネット		担当 様
納入年月日	平成24年 5月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 3年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 474
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 81	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 151	殺菌+アル: 87
	リークチェック: 143	自己洗浄: 59	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 本体側		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 5月 21日

ご署名

玉瀧 宗義

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

427.5.21
後藤 (Red circular stamp of the worker, reading '後藤').