

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150422-0

発行日 平成27年4月22日

|       |                                                                               |                                                            |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                            | 製造番号: 100712                                  |
| 作業年月日 | 平成 27年 4月22日                                                                  |                                                            | 作業時間: / Hr                                    |
| 顧客名   | 武田中央医院 様                                                                      |                                                            | TEL: 024-559-1664                             |
| 所在地   | 福島県福島市泉字仲ノ町14-13                                                              |                                                            | 担当 様                                          |
| 販売店   | 株式会社アクトメディカルサービス                                                              |                                                            | 担当 井上 様                                       |
| 納入年月日 | 平成 25年 4月12日                                                                  | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 |                                                            | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                  |                                                            | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                                     |                                                                    |           |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 <i>なし</i>           |                                                                    |           |                                                        |
|                                     |                                                                    |           |                                                        |
| 不具合原因、作業内容 <i>なし</i>                |                                                                    |           |                                                        |
|                                     |                                                                    |           |                                                        |
| 点検項目                                |                                                                    |           |                                                        |
| フタロック                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 酸素ライン                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| アルコールライン                            | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 <i>594</i> |
| オゾンセンサ                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 給水ライン                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 濃度計流量                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 水位センサー                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input type="checkbox"/> 履歴 ppm                     |
| 水漏れ確認                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 清掃                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| トレイ                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 殺菌槽コネクタ                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                            |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 <i>なし</i> |                                                                    |           |                                                        |
|                                     |                                                                    |           |                                                        |

|          |                   |                                                        |                   |                 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: <i>0</i> | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌: <i>314</i>    | 殺菌+アル: <i>1</i> |
|          | リークチェック: <i>2</i> | 自己洗浄: <i>211</i>                                       | アルコール単独: <i>0</i> | エア単独: <i>1</i>  |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾンセンサー       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ     |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| 吸盤 (3個入) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  | トレイピン         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |

|                                                                      |  |       |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------|
| お客様ご確認署名欄                                                            |  | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |       |
| ご署名 <i>横川 順子</i>                                                     |  | 印     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス  
TEL: 022-782-4661

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 責任技術者     | 作業者                          |
| <i>大友</i> | <i>H27.4.22</i><br><i>大友</i> |