

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150515-01

発行日 平成27年 5月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300227
作業年月日	平成 年 月 日		作業時間: / Hr
顧客名	十和田北クリニック 様		TEL: 0176-21-3741
所在地	青森県十和田市元町東5丁目8番54号		担当
販売店	共立医科器械(株)		担当 藤村様
納入年月日	平成 26年 3月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 368
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
2015年 02月07日に変更			

装置 情報	交換後運転回数: 1	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 167	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 159	自己洗浄: 122	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手		☒	2/1
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2015年 5月 15日 青森県十和田市元町東5丁目8番54号 十和田北クリニック 院長 鵜浦 有弘 ご署名 TEL 0176-21-3741 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
 TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	2015.5.15