

保守点検・修理 報告書

発行日 平成27年 4月17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒器 OED-1000S		製造番号：300022
作業年月日	平成 27年 4月 17日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	藤谷内科クリニック様		TEL：022-361-0211
所在地	塩釜市南錦町8-10		担当 様
販売店	株式会社シバタインテック		担当 様
納入年月日	平成 25年 4月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 2年目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H26.7. H26.10 排水栓詰まり 交換

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 696
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置情報	交換後運転回数：954 更新（リセット）実施 ☒ 未実施	殺菌：436	殺菌+アル：1224
	リークチェック：87 自己洗浄：567	アルコール単独：5	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	排水フィルター		☒	1
吸盤（3個）		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 4月 17日

ご署名 久野 幸子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27.4.17 