

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150818-5

発行日 平成27年8月18日

|       |                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                                       | 製造番号: 100041      |
| 作業年月日 | 平成 27 年 8 月 18 日                                                            |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | ゆとりが丘クリニック 様                                                                |                                                                       | TEL: 019-699-1122 |
| 所在地   | 岩手県滝沢市土沢541番地                                                               |                                                                       | 担当                |
| 販売店   | (株)南部医理科 本社                                                                 |                                                                       | 担当 内村様            |
| 納入年月日 | 平成 22 年 7 月 22 日                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 390   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0.71       |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 390 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

洗浄3分（7分用）のバッキンが劣化してきているので、早めの交換をお勧め致します。

|      |                |                                                                             |            |              |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 47077 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 19     | 殺菌+アル: 1,916 |
|      | リークチェック: 44    | 自己洗浄: 981                                                                   | アルコール単独: 1 | エア単独: 0      |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクター継手 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 濃度計用フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度計 Assy |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27.8.18 年 月 日  
医療法人 ゆとりが丘クリニック  
ゆとりが丘クリニック  
ご署名 理事長 高橋 邦尚

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F  
TEL: 022-782-4661

| 責任技術者                                                                                 | 作業者            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | H27 8/18<br>佐子 |