

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151117-0-1

発行日：平成 27年 11月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機0ED-1000S ☒		製造番号： 300072
作業年月日	平成 27年 11月 17日		作業時間：) Hr
顧客名	青山医院 様		TEL： 024-958-2925
所在地	福島県郡山市日和町字南原2-133		担当 様
販売店	株式会社メディカルネット		担当 様
納入年月日	平成 25年 11月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 795
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
なし (コネクト基板交換)			

装置 情報	交換後運転回数： 60120	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 283	殺菌/消毒+7L： 879
	リークチェック： 1	自己洗浄： 505	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	27 年 11 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 青山一平
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
(大)	H27/11/17 (大)