

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151218-0-1

発行日：平成 27年 12月18日

|       |                                                                                                                           |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input type="checkbox"/>                       | 製造番号： 100490                    |
| 作業年月日 | 平成 27年 12月 18日                                                                                                            | 作業時間： 1.25 Hr                   |
| 顧客名   | こじま内科 様                                                                                                                   | TEL： 0246-74-1501               |
| 所在地   | 福島県いわき市遠野町上遠野字太田20-3                                                                                                      | 担当 様                            |
| 販売店   | サンセイ医機株式会社 様                                                                                                              | 担当 様                            |
| 納入年月日 | 平成 24年 4月 13日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 付属品                             |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                                               | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 645   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タクトパネル、コントローラ基板、シリコンホース交換

|      |                                                                                              |            |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：2021→20 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 2   | 殺菌/消毒+7L：2020 |
|      | リークチェック： 1963 自己洗浄： 1101                                                                     | アルコール単独： 1 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 12月 18日

ご署名

小島 俊彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

H27/12/18

Ver.3.0