

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151019-0-1

発行日：平成 27年 10月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒	製造番号: 300069
作業年月日	平成 27年 10月 19日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	くわのすずき内科クリニック 様	TEL: 024-991-5700
所在地	福島県郡山市桑野4-10-6	担当 様
販売店	サンセイ医機株式会社 郡山営業所	担当 様
納入年月日	平成 25年 10月 22日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 503
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.62 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置情報	交換後運転回数: 0	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒: 388	殺菌/消毒+アル: 1028
	リークチェック: 1480	自己洗浄: 543	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ; 水槽側		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ; チューブ側		☒	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサー		☒	/	コネクタ基板		☒	/

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 10 月 19 日

ご署名

小松

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H27/10/19