

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151113
発行日：平成 27 年 11 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100585
作業年月日	平成 27 年 11 月 13 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	大泉記念病院	様	TEL： 0224-22-2111
所在地	宮城県白石市福岡深谷一本松5-1		担当 様
販売店	株式会社シバタインテック		担当 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常あり					
不具合原因、作業内容					
異常あり					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パル数 470
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
異常あり					

装置情報	交換後運転回数： 1265	更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒： 1388	殺菌/消毒+7L： 2029
	リークチェック： 2	自己洗浄： 750	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄		27年 11 月 13 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	