

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150917-S1

発行日 平成27年9月17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号: 300368
作業年月日	平成 27年 9月17日		作業時間: / Hr
顧客名	こいずみクリニック		TEL: 0244-22-6001
所在地	福島県南相馬市原町区大町3-77-1		担当 様
販売店	サンセイ医機株式会社		担当 様
納入年月日	平成 26年 9月18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バル数 665
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 27/665 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 325	消毒+アル: 275
	リークチェック: 272	自己洗浄: 221	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
吸盤(3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

小 沢 弘 幸



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H27.9.17

