

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150810-15

発行日 平成27年8月10日

|       |                                                                             |                                                            |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                            | 製造番号: 100483      |
| 作業年月日 | 平成27年 8 月 10 日                                                              |                                                            | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | 二戸クリニック 様                                                                   |                                                            | TEL: 0195-25-5770 |
| 所在地   | 岩手県二戸市石切所森合32-1                                                             |                                                            | 担当                |
| 販売店   | 共立医科器械(株) 本社                                                                |                                                            | 担当 長瀬様            |
| 納入年月日 | 平成 24年 3月 28日                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>              |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 ナシ

不具合原因、作業内容

定期交換部品交換

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input type="checkbox"/>                                                   | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 478    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ

|      |                                                                   |            |          |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 262 更新 <input checked="" type="checkbox"/> (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 809    | 殺菌+アル: 0 |
|      | リークチェック: 74 自己洗浄: 418                                             | アルコール単独: 0 | エア単独: 0  |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 濃度計用フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度計 Assy |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 10 日

ご署名 山縣 浩子 

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F  
TEL: 022-782-4661

| 責任技術者                                                                                 | 作業者            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | H27 8/10<br>庄子 |