

点検・修理報告書

管理 No. 2019. 1. 23

発行日: 2019年 01月 23日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 1 月 23 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	玉木デンタルクリニック 様
所在地	TEL:
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100197	運転回数: 1290	タッチパネル Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	-----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 槽内温度低下1

原因

① 熱水消毒時設定値以内に水温が1℃上昇できない時に槽内温度低下1のエラーになります。

処置、作業内容

① 設定値 (パラメータ) の設定値を変更致しました。

特記事項

洗浄槽内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります
ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 12 日

ご署名 理事長 玉木 克 印

修理業者

株式会社IHJアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.1.23 田	桐 19/01/23 野