

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151216-0-1

発行日：平成 27年 12月16日

|       |                                                                                                     |                                                                       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 100133                                  |
| 作業年月日 | 平成 27年 12月 16 日                                                                                     |                                                                       | 作業時間： 2 Hr                                    |
| 顧客名   | 織内医院 様                                                                                              |                                                                       | TEL： 0246-44-1133                             |
| 所在地   | 福島県いわき市常磐関船町迎16                                                                                     |                                                                       | 担当 様                                          |
| 販売店   | 株式会社日東 様                                                                                            |                                                                       | 担当 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 22年 12月 14日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目                     |                                                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                       | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 409    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

コントロール基板、タクトパネル、吸水フィルター交換

|          |                                 |             |                |
|----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：1198→0 更新（リセット）（実施）・未実施 | 殺菌/消毒： 4085 | 殺菌/消毒+アル： 1449 |
|          | リークチェック： 561 自己洗浄： 1286         | アルコール単独： 20 | エア単独： 3        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 吉田 賢

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者

H27/12/16



Ver.3.0