

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100289
作業年月日	平成 27 年 12 月 15 日				作業時間:	1
顧客名	今金 診療所				TEL:	0137-82-4187
所在地	瀬棚郡今金町字今金359番地12				担当	箱 木
販売店					担当	
納入年月日	平成 27 年 12 月 10 日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入	
出張・引取	修理	出	理	理	修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 排水異常履歴 1 回
 排水ホース折れなどがあるところ異常です。点検を行い不具合の事を
 確認しました。再現するようばりお知らせする
 不具合原因、作業内容

点検項目		
フタロック	正常	殺菌槽 LED 正常
酸素ライオン	正常	エアライン 正常
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作 正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン 正常
給水ライン	正常	細管送水ライン 正常
濃度計流量	正常	排気ライン 正常
水位センサー	正常	オゾン濃度 正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動 正常
清掃	正常	電源コード 正常
トレー	正常	殺菌チューブ類 正常
殺菌槽コネクタ	正常	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特記事項: 以前、気圧を下げたため給水口付近と
 確認しておきます

装置情報	交換後運転回数:	196	更新 (リセット) 実施:	実施	未実施	殺菌:	343	殺菌+7L:	412
	リークチェック:	54	自己洗浄:	1		7L-7L単独:	0	エア単独:	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		交換	1	03 2404 組		交換	
排水栓		交換	1			交換	
オゾン水濃度計		交換	1			交換	
オゾン水濃度計用7L用		交換	1			交換	
オゾンセンサー		交換	1			交換	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
 医療法人野の花 今金診療所
 ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北6条東5-1-4
 TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者