

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160119-0-1

発行日：平成 28年 1月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100583
作業年月日	平成 28年 1月 19日		作業時間： / Hr
顧客名	城北内科胃腸科クリニック 様		TEL： 0246-22-8800
所在地	福島県いわき市平幕ノ内字高田18-8		担当 様
販売店	オリンパスメディカルインス販売(株)いわき営業所様		担当 様
納入年月日	平成 24年 12月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 8/3 酸素圧力異常

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 563
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置情報	交換後運転回数： 685	更新 ☒ (セット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 4/4	殺菌/消毒+7L： 1.619
	リークチェック： 2.031	自己洗浄： 9/6	アルコール単独： 7	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

城北内科胃腸科クリニック

ご署名 院長 佐藤 二三彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	1728 1/19 庄子