

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160122-18

発行日：平成28年 / 月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300197
作業年月日	平成 28 年 / 月 22日		作業時間： / Hr
顧客名	鈴木内科消化器科クリニック 様		TEL： 0197-51-6399
所在地	岩手県奥州市水沢区寺小路26-1		担当 様
販売店	共立医科器械(株)水沢営業所 様		担当 佐々木 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/11、4/11、13/29 消毒時給水異常 × 3回

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 662
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ
1日の最後に自己洗浄を済ませました。

装置 情報	交換後運転回数： 180 更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒： 340	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0 自己洗浄： 16	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 / 月 22 日

ご署名 鈴木 敬敬



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H28 1/22 庄子