

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160412-K-1
発行日：平成 28年 4月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号： 300216 300876
作業年月日	平成 28年 4月 13日	作業時間： 1 Hr	
顧客名	おおくぼ胃と腸・内科クリニック 様		TEL： 0246-21-0091
所在地	福島県いわき市平字童子町2-22		ご担当 様
販売店	株式会社すすむ器械店 様		ご担当 様
納入年月日	平成 27年 1月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1/7 E:111, E:401 2/25 E:215 2/18 E:111, E:401 3/10 E:109 (0.97)	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数 560
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： 1594	更新（リセット） ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 20917	殺菌/消毒+アル： 1035
	リークチェック： 209	自己洗浄： 356	アルコール単独： 99	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	128 年 4 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 大友 義光	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.4.13 