

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160322-8

発行日：平成28年 3 月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100448	
作業年月日	平成28年 3 月 22日	作業時間： / Hr	
顧客名	虹ヶ丘内科クリニック 様	TEL：017-765-1177	
所在地	青森県青森市虹ヶ丘1-3-13	ご担当 様	
販売店	(株)加賀医療器	ご担当 小野 様	
納入年月日	平成 24年 3月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 ナシ・PPS オゾン水交換・フロン洗浄コンタクト交換

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 410
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☒		☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ

装置 情報	交換後運転回数： 425 更新 (1000) 実施 未実施		殺菌/消毒： 308	殺菌/消毒+7L： 1112
	リークチェック： 0	自己洗浄： 909	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

虹ヶ丘内科クリニック

院長 工藤 育男

青森県青森市虹ヶ丘1-3-13

電話017(765)1177

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



H28 3/22
庄子

Ver.3.1