

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2060324-JS

発行日：平成28年3月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100188
作業年月日	平成 28 年 3 月 24 日	作業時間： / Hr
顧客名	緑ヶ丘消化器内科医院 様	TEL：019-662-7177
所在地	岩手県盛岡市緑ヶ丘3-2-34	ご担当 様
販売店	(株)南部医理科	ご担当 内村 様
納入年月日	平成 23年 2月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/16

E-200

(ポンプ)

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック 正常 ☒酸素ライン 正常 ☒アルコールライン 正常 ☒オゾンセンサ 正常 ☒給水ライン 正常 ☒濃度計流量 正常 ☒水位センサー 正常 ☒水漏れ確認 正常 ☒清掃 正常 ☒ 清掃 ☒トレイ 正常 ☒殺菌槽コネクタ 正常 ☒殺菌槽 LED 正常 ☒エアライン 正常 ☒オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 689排水栓、排水ライン 正常 ☒細管送水ライン 正常 ☒排気ライン 正常 ☒オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm異常音、振動 正常 ☒電源コード 正常 ☒殺菌チューブ類 正常 ☒マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし トレーに少しヒビあり。(左上のみ)

装置 情報	交換後運転回数： 962 更新 (セット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 666	殺菌/消毒+7L： 4.064
	リークチェック： 4.728 自己洗浄： 1.460	アルコール単独： 34	エア単独： /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

鈴木 昇

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者

128/3/24
佐子

Ver.3.1