

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160406-1  
発行日：平成28年4月6日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号：100711      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 4 月 6 日                                                                                                           |                                                            | 作業時間： 1 Hr       |
| 顧客名   | 小松医院 様                                                                                                                    |                                                            | TEL：0246-89-2041 |
| 所在地   |                                                                                                                           |                                                            | ご担当 様            |
| 販売店   | (株) 村松器械店 様                                                                                                               |                                                            | ご担当 様            |
| 納入年月日 | 平成 25 年 4 月 24 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                  |

|                 |
|-----------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 |
| 異常なし            |
|                 |
|                 |

|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
| 定期保守点検     |
|            |
|            |

| 点検項目     |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 355    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

|                           |
|---------------------------|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |
|                           |
|                           |

|          |            |                                                       |             |             |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：39 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌/消毒：2     | 殺菌/消毒+7L：82 |
|          | リークチェック：85 | 自己洗浄：82                                               | 7Lアルコール単独：0 | エア単独：0      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 28 年 4 月 6 日<br>福島県いわき市遠野町上遠野字本町84<br>小松医院 印 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  | ご署名 小松 典男                                    |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                                              |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
TEL：022-782-4661

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 責任技術者<br>H28.4.6 | 作業者<br>H28.4.6 |
|                  |                |