

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160712-GK

発行日：平成 28年 7月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300634
作業年月日	平成 28 年 7 月 12 日		作業時間： / Hr
顧客名	いしのまき矢吹クリニック 様		TEL： 0225-21-6117
所在地	宮城県石巻市大橋3-2-7		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 石巻支店		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 9 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 820
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐	バリスタ	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 1553	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 659	殺菌/消毒+アル： 895
	リークチェック： 0	自己洗浄： 125	アルコール単独： 4	エア単独： 223

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☒	15'
オゾンセンサー		☒	/	アルコールキャップ		☐	

お客様ご確認署名欄	H28年 7月 12日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 山内 清子 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンスII
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.7.12 