

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160628-0-1

発行日：平成 28年 6月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機0ED-1000		製造番号：100517
作業年月日	平成 28年 6月 28日		作業時間： 2 Hr
顧客名	長谷川内科消化器科医院 様		TEL： 0242-22-7180
所在地	福島県会津若松市行仁町3-31		ご担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス 様		ご担当 様
納入年月日	平成 24年 6月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 490
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

バリステータス追加

装置情報	交換後運転回数： 744	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 1926	殺菌/消毒+7L： 2032
	リークチェック： 33	自己洗浄： 1052	アルコール単独： 10	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

16 年 6 月 28 日

ご署名

長谷川 亮

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



H28/06/28

