

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160525-K-1

発行日：平成 28年 5月 25日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号： 300565
作業年月日	平成 28年 5月 25日	作業時間： / Hr	
顧客名	遠山胃腸科内科医院 様		TEL： 0242-24-8911
所在地	福島県会津若松市城北町6-1		ご担当 様
販売店	株式会社ジオット会津営業所 様		ご担当 山口 様
納入年月日	平成 27年 5月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
9/7 E:402 排水異常 1/27 E:209 尿水汚れ	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 711
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 1276	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 587	殺菌/消毒+AL： 691
	リークチェック： 713	自己洗浄： 284	アルコール単独： 18	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	H28年 5月 25日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 山崎 早苗	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.5.25 