

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160526-K1

発行日：平成 28年 5月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100498
作業年月日	平成 28 年 5 月 26 日		作業時間： / Hr
顧客名	玉淵医院		TEL：
所在地	宮城県柴田郡柴田町槻木上町1-1-58		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット		ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常無し			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 530
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.90 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	バリスタ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 118	更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌/消毒： 188	殺菌/消毒+7L： 178
	リークチェック： 150	自己洗浄： 123	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄	2016 年 5 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	玉 淵 均
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	2016.5.26 堅田