

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-21406

No. 160418

配布先	納入先	新鋭工業（株） 仙台支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	青森県十和田市東一番町2-23		機番	000776
環営	ユーザー名	えとクリニック 様		納入日	平成17年4月12日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年11月24日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年4月11日

修理依頼・異常内容

エラー8（オゾンセンサ故障またはオゾンガス漏れ異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾンセンサの故障が原因でした。この部品交換と合わせてオーバーホール致しました。

番号1～3：定期交換部品

番号4～7：チューブ、水ポンプ



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.44～0.55 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.6％ 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.089～0.148 MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：8630

承認

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1式	番号：SPS-11959
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		
2～3	オゾンセンサ、水位レベルセンサー	1式	
4	配管チューブ、パッキン	1式	
5～8	水ポンプ（P-1, 2, 3）、エアポンプレシー	1式	
9～10	給水電磁弁、排水バルブ（抵抗含む）	1式	
11	PSA ドレン系統電磁弁、フィルタ	1式	
12	オゾン発生装置	1式	

審査

作成

H28.4.18

中澤