

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160901-K
発行日：平成 28年 9月 1日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号： 300043
作業年月日	平成 28年 9月 1日	作業時間： / Hr	
顧客名	いがらし内科クリニック 様		TEL： 0248-21-9111
所在地	福島県白河市老久保13-1		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社 郡山営業所		ご担当 様
納入年月日	平成 25年 8月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 508
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
バルブ交換	

装置 情報	交換後運転回数： 429	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+アル： 1373
	リークチェック： 1379	自己洗浄： 684	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄	2016 年 9 月 1 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	署名 五十嵐 登雄 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	2016.9.1 堅田