

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160905-8

発行日：平成28年 9 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300044
作業年月日	平成28年 9 月 5 日	作業時間： / Hr
顧客名	後藤医院 様	TEL：0238-43-2135
所在地	山形県南陽市赤湯342	ご担当 様
販売店	岡崎医療(株) 本社 様	ご担当 木村 様
納入年月日	平成 25年 9 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴：ナシ	
不具合原因、作業内容	
保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 72/
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	交換 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ナシ	

装置情報	交換後運転回数： 93/	更新（ ☒ ）実施・未実施	殺菌/消毒： 1077	殺菌/消毒+7L： 1822
	リークチェック： 0	自己洗浄： 849	アルコール単独： 4	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バルブ追加		☒	1

お客様ご確認署名欄	H28年 9 月 5 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	後藤利昭 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	28/9 庄子